

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORTEZY KG/ ORTEZY KD/ ORTEZY TUŁOWIA



ORTEZA: Orteza jest aparatem ortopedycznym zakładanym bezpośrednio na ciało. Wskazana jest u osób z wrodzonymi i nabytymi schorzeniami i dysfunkcjami narządów ruchu. Indywidualne ortezy wykonywane są zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty, aby jak najlepiej spełniały swoją leczniczą i rehabilitacyjną funkcję.

Ortezy COP to produkty nowoczesne i innowacyjne, wykonane z ogromną starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest uzyskanie satysfakcji pacjentów



ZAKŁADANIE ORTEZY:

Ortezę zakładamy zgodnie z instrukcją i wskazówkami przekazanymi przez technika wykonującego protezę.



WAŻNE:

Rozmiar odpowiada wymiarom pobranym podczas miary pacjenta. Orteza wykonana jest zgodnie z zaleceniami lekarza lub rehabilitanta. Warunkiem właściwego funkcjonowania ortezy jest jej odpowiednie dopasowanie przez technika wykonującego zaopatrzenie.

Orteze należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub rehabilitanta.

Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania ortezy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie, osób z zaburzeniami czucia. Skóra w miejscu stosowania ortezy powinna być sucha i czysta.

Należy na bieżąco kontrolować stan skóry. W przypadku pojawienia się zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem.

Zakładanie ortezy na noc jest możliwe jedynie w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego.



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

Orteza wykonana w COP powinna być regularnie serwisowana tylko i wyłącznie przez techników COP.

Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek „dźwięki” dochodzące z ortezy należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem COP.

Ortezę należy utrzymywać w czystości. Przetrzeć wilgotną szmatką, płynem dezynfekującym, wodą z dodatkiem mydła w celu zachowania higieny.



Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.



Żadnych elementów ortezy nie należy prać w pralce.



Suszyć z dala od źródła ciepła.



Należy zwracać uwagę czy nie występują luzy z miejscach łączenia elementów ortezy. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do firmy wykonującej zaopatrzenie ortopedyczne celem przeglądu technicznego. Niedopuszczalne jest własnoręczne rozbieranie produktu przez pacjenta oraz dokonywanie w nich przeróbek

**OSTRZEŻENIA:**

Przed użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej ulotki.

Przed każdym użytkowaniem wyrobu należy sprawdzić, czy na wyrobie nie pojawiły się uszkodzenia poszczególnych elementów i łączeń.

Tylko nieuszkodzony wyrób oraz jego prawidłowe założenie gwarantuje jego właściwe funkcjonowanie.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się lub nasilenia dolegliwości bólowych konieczne należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub rehabilitanta.

Orteza powinna być stosowana tylko przez jednego pacjenta. Stosowanie wyrobu niezgodnie z zasadami instrukcji użytkowania może grozić poważnymi powikłaniami.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji zwalnia producenta od odpowiedzialności uszkodzenia produktu.